

# Chřipka A/B Antigen Test Kontrolní tampony 014L470C



**Rychlý test Kontrolní tampony pro externí kontrolu kvality k testu 014L470 Chřipka A/B antigen.**

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

ulti med Chřipka A/B Antigen Test Kontrolní tampony je určen pouze pro externí kontrolu kvality k testu 014L470 Chřipka A/B Antigen.

## SKLADOVÁNÍ A STABILITA

ulti med Chřipka A/B Antigen Test Kontrolní tampony může být skladován při pokojové teplotě nebo v lednici při 2-30°C. Tampony musí zůstat v ochranném obalu až do doby použití. Tampony jsou stabilní do data expirace uvedeném na obalu.

- Nezamrazovat
- Nepoužívejte po uplynutí data expirace

### Dodávaný materiál

- Chřipka A Pozitivní Kontrola Tampon
- Chřipka B Pozitivní Kontrola Tampon
- Chřipka A/B Negativní Kontrola Tampon
- Příbalový leták


### Materiál nedodávaný, ale doporučený

- Chřipka A/B Antigen Test 014L470
- Stopky

## POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ EXTERNÍ KVALITY

**Před testováním vytemperujte testovací kazetu, pufr a kontrolní tampony na pokojovou teplotu (15 – 30 °C).**

1. Umístěte extrakční zkumavky do pracovního stojánu. Uchopte lahvičku s extrakčním pufrém svisle vzhůru dnem. Stlačte lahvičku a nechte pufr kapat volně do extrakční zkumavky. Nedotýkejte se při tom okraje extrakční zkumavky. Přidejte 10 kapek roztoku do extrakční zkumavky.
2. Do extrakční zkumavky vložte kontrolní tampon, t.j. Chřipka A Pozitivní Kontrola Tampon, Chřipka B Pozitivní Kontrola Tampon, nebo Chřipka A/B Negativní Kontrola Tampon.
3. Tampon 15 krát intenzivně protřepejte ve zkumavce za současného přitlačení tamponu o dno zkumavky, aby se tak uvolnili látky vázané v tamponu.
4. Přitlačujte tampon o stěnu zkumavky tak, aby se co nejlépe vyždímal a aby většina kapaliny zůstala ve zkumavce. Zlikvidujte tampon.
5. Uzavřete hrot kapátka v horní části extrakční zkumavky.
6. Postup je popsán v příbalovém letáku testu 0014L470 v bodě 5, PŘÍPRAVA VZORKU A NÁVOD NA POUŽITÍ

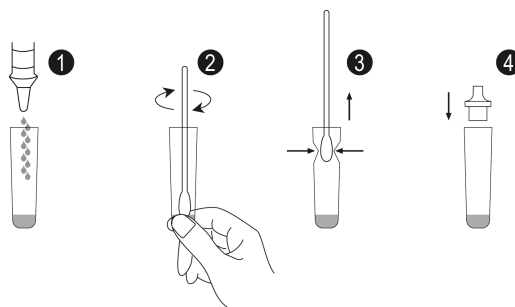

Reprodukce se může lišit od originálu!

Výrobce	Obsahuje balení pro „n“ testů
In vitro diagnostikum	Šarže
Jednorázové použití	Expirace
Čtěte instrukce pro použití	Skladujte při teplotě
Chraňte před přímým slunečním světlem	Objednávací číslo
Uchovávejte v suchu	

**Tento návod na použití je v souladu s nejnovějšími technologiemi/revizemi.  
Změna vyhrazena bez předchozího upozornění!**



### Výrobce

ulti med Products  
(Deutschland) GmbH  
Reeshoop 1 •  
22926 Ahrensburg • Germany  
Telefon: +49-4102 – 80090  
Fax: +49-4102 – 50082  
e-mail: [info@ultimed.de](mailto:info@ultimed.de)

### Distributor v EU

ulti med Products  
(Belgium) BVBA  
Honzebroekstraat 137  
8800 Roeselare  
Phone : +32 +51 200 425  
Fax : +32 +51 200 449  
e-mail : [belgium@ultimed.org](mailto:belgium@ultimed.org)

### Distributor pro ČR

JK Trading s.r.o.  
Křivatcová 421/5  
155 21 Praha  
tel.: +420 257 220 760  
fax : +420 257 220 771  
e-mail : [paha@jktrading.cz](mailto:paha@jktrading.cz)

### Distributor pro SK

JK Trading s.r.o.  
Mečíkova 30  
841 07 Bratislava  
tel.: +421 264 774 620  
fax : +421 264 774 593  
e-mail : [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

