



Kód 18 044 5 x 5 mL
SKLADOVÁNÍ PŘI 2-8°C
Pouze pro <i>in vitro</i> diagnostiku v klinických laboratořích

BIOCHEMICKÝ KALIBRÁTOR (Human)

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Biochemický kalibrátor je lyofilizované lidské sérum, které je určeno ke kalibraci měřících metod firmy Biosystems specifikovaných v tabulce hodnot.

SLOŽENÍ

Biochemický kalibrátor. Lyofilizované lidské sérum (pro 5 mL) obsahující komponenty v koncentracích vhodných pro kalibraci měřícího procesu v laboratoři.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

1. Opatrně otevřete lahvičku aby nedošlo ke ztrátě lyofilizovaného materiálu.
2. Do lahvičky napipetujte přesně 5,00 mL destilované vody. Hodnoty komponentů závisí na přesnosti postupu rekonstituce.
3. Uzavřete lahvičku zátkou a nechejte jí stát 20 minut při pokojové teplotě.
4. Opatrně promíchejte, zabraňte vzniku pěny, aby došlo ke kompletnímu rozpuštění lyofilizátu.
5. Rozpuštěné kontrolní sérum použijte jako kalibrátor.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladovat při 2-8°C.

Lyofilizovaný kalibrátor je stabilní do expirace uvedené na štítku lahvičky.

Komponenty v již jednou otevřeném materiálu jsou stabilní alespoň 7 dní při 2-8°C, mimo:

- AST je stabilní 8 hodin při 2-8°C.
- Aktivita alkalické fosfatázy se v průběhu 2 hodin po rozpuštění zvýší o 10-20%

Rozpuštěný kalibrátor je stabilní nejméně 30 dní při -20°C . Kalibrátor lze zamrazit pouze jednou.

SPECIFIKOVANÉ HODNOTY

Přesné koncentrace jednotlivých komponentů a jejich sledované množství včetně návazností jsou uvedené v příložené tabulce originální příbalové informace. Sledovatelnost výsledků může být zaručena pouze za předpokladu použití reagentů a postupu doporučeného měření spol. BioSystems.

UPOZORNĚNÍ

Překlad revidován k datu: 18.1.2018.

Vzhledem k možné inovaci výrobku Vám doporučujeme překontrolovat český překlad s originálním příbalovým letákem porovnáním podle identifikačního čísla návodu uvedeném v zápatí.

Originální návod najdete v soupravě a na internetové adrese:

www.biosystems.es

Český návod je k dispozici na: www.jktrading.cz

Výhradní distributor:

ČR : JK-Trading spol.s.r.o., Křivatcová 421/5,150 21 Praha5,
tel.: +420 257 220 760

SK : JK-Trading spol.s.r.o., Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,
tel.: + 421 264 774 591

V případě mimořádných událostí:

ČR : Toxikologické informační středisko (TIS), klinika pracovního lékařství VFN a . LF UK,

tel.: +420 224 91 92 93 a +420 224 91 54 02

SK : Toxikologické informačné centrum Bratislava, 833 05, Limbová 5, tel.: +421 254 774 166

VÝROBCE

BioSystems S.A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain)
ISO 13485 - TÜV Rheinland - Reg.: SX 60010383 0001
ISO 9001 - TÜV CERT - Reg.: 01 100 6696